

# AFIAS

## Washing Cartridge

### USO PRETENDIDO

AFIAS Washing Cartridge é destinado para uso na limpeza do adaptador de ponteiros (tip) nos sistemas AFIAS 6.

### PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA E ADVERTÊNCIAS

- Uso somente em diagnóstico *in vitro*.
- Leia atentamente e siga as instruções de uso.
- O cartucho deve permanecer selado na embalagem de alumínio até o momento do uso. Não usar se a embalagem estiver aberta ou danificada.
- Este produto não deve ser utilizado após a data de validade.
- Não realize nenhum teste no sistema por **30 minutos** após a realização do processo da limpeza.

### ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE

O cartucho é estável por 24 meses a partir da data de fabricação (enquanto selado na embalagem de alumínio) se armazenado entre 15 – 30°C.

### COMPOSIÇÃO DO KIT

- Componentes do kit AFIAS Washing Cartridge:
  - Cartuchos de Lavagem 6
  - Instrução de Uso 1


O cartucho contém 2 poços: um está preenchido com solução Tween 20 a 0,2% e é selado com lacre de alumínio. O outro poço (marcado com uma seta) está vazio e selado com lacre de alumínio.

### MATERIAIS NECESSÁRIOS, MAS NÃO FORNECIDOS

- Etanol 70% ou Isopropanol 70%

### INSTRUÇÕES DE USO

1. Retire o cartucho da embalagem de alumínio.
2. Perfure o lacre de alumínio com uma ponteira e dispense **250uL de etanol 70% ou isopropanol 70%** dentro do poço vazio, indicado por uma seta (conforme figura abaixo).
3. Insira o cartucho preparado no **1º canal** do sistema.
4. No menu principal, acesse “**MANUTENÇÃO**”, “**LAVAR ADAPTADOR DE TIP**” e aperte “**START**”.
5. O processo de lavagem levará de 2 a 3 minutos.
6. **Não realize nenhum teste em um período de 30 minutos após a lavagem.**

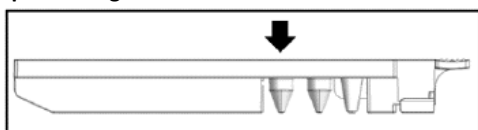

\*Por favor, consulte o Manual de operações do sistema AFIAS 6 para maiores informações sobre o procedimento.

**Nota: AFIAS Washing Cartridge é somente para uso no AFIAS 6.**

A Boditech Med Inc. recomenda a realização da lavagem do adaptador de ponteiros (tip) a cada 2 semanas.

### GARANTIA

Esta instrução de uso deve ser lida atentamente antes da utilização do produto e as instruções nela contidas devem ser rigorosamente cumpridas. A confiabilidade dos resultados do teste não poderá ser garantida em caso de desvio às instruções.

No caso de danos nas embalagens, contate a BioSys Ltda.

### DESCARTE

Seguir as disposições da resolução sobre o regulamento técnico para gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, bem como outras práticas de biossegurança equivalentes.

**Observação:** Favor consultar a tabela abaixo para identificar os diversos símbolos:

	Consulte as instruções de uso
	Validade
	Lote
	Catálogo
	Cuidado, consulte documentos anexos
	Fabricante
	Representante autorizado da Comunidade Europeia
	Diagnóstico <i>in vitro</i>
	Limites de temperatura
	Não reutilizar
	Este produto cumpre as exigências da Diretiva 98/79/CE relativa aos dispositivos médicos para diagnóstico <i>in vitro</i>

**Boditech Med Incorporated**

43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon,  
Chuncheon-si, Gang-won-do  
Republic of Korea  
Tel: +(82) -33-243-1400  
Fax: +(82) -33-243-9373  
www.boditech.co.kr

**Fabricado por: Boditech Med Incorporated**  
**Importado e Distribuído por: BioSys Ltda**  
Rua Coronel Gomes Machado, 358, Centro, Niterói, RJ  
Cep: 24020-112  
CNPJ: 02.220.795/0001-79  
MS –nº 10350840350  
SAC: sac@biosys.com.br-(21) 3907-2534 / 0800 015 1414  
www.biosys.com.br